

## Reinigung

Verschmutzungen können mit lauwarmem Wasser und einem Lappen entfernt werden. Dem Wasser können sanfte Reinigungsmittel zugesetzt werden. Keine aggressiven bzw. scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

## Desinfektion

Liegefläche regelmäßig bzw. nach jeder Reinigung desinfizieren. Verwendung von handelsüblichen Flächendesinfektionsmittel bevorzugen. Richten Sie sich nach den Angaben des Präparateherstellers oder lassen Sie sich von den zuständigen Pflegepersonen unterweisen.

## ⚠ Vorsicht

1. Rauchen Sie nicht auf der Matratze und nicht in der Nähe der Pumpe.
2. Halten Sie die Pumpe von heißen Oberflächen fern.
3. Explosionsgefahr bei Verwendung in Gegenwart von entflammaren Anästhetika.
4. Sicherung wie angegeben ersetzen: T1A 250V  
Leistungsaufnahme: ~230V 50Hz - 0,1A max.

## Technische Eigenschaften

<b>Abmessungen</b> Matratzenauflage (Länge x Breite x Höhe) Materialstärke Pumpe (Länge x Breite x Höhe)	200cm x 90cm x 25cm 0,25mm 30cm x 13,5cm x 11cm
<b>Gewicht</b> Matratzenauflage Pumpe	10,3kg 2,3kg
<b>Belastbarkeit</b> Max. Patientengewicht	200kg
<b>Umgebungsbedingungen</b> <u>Betriebsbedingungen</u> Umgebungstemperatur Relative Luftfeuchtigkeit <u>Lager- und Versandbedingungen</u> Umgebungstemperatur Relative Luftfeuchtigkeit	10°C bis 40°C 10% bis 75% -20°C bis +70°C 10% bis 95%
<b>⚠ Achtung</b>	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung durch. Beachten Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen in der Anleitung. Nichtbeachtung der Anleitung kann dem Verwender oder dem Gerät Schaden zufügen.

**MOVVOX**  
h e a l t h c a r e

**movocare**  
adm pro

# Wechseldruck-System Dekubitusgrad IV

## Bedienungsanleitung

movox gmbh  
Unterferlach 112  
A-9170 Ferlach

www.movox.at  
office@movox.at  
+43 660 94 82 870

CE RoHS

## Kurzbeschreibung

Dekubitus ist das größte Problem für Patienten, die bettlägerig sind oder längere Zeit im Bett verbringen, umso mehr, wenn sie sich im Bett nicht drehen können. Die Wechseldruckmatratze wird verwendet, um die Druckpunkte des Körpers zu verteilen und diese Punkte durch Aufblasen und Entleeren der Zellen der Druckmatratze zu wechseln. Ohne diese Art der Behandlung sind Wunden / Druckstellen äußerst schwer zu verhindern und erfordern eine kontinuierliche Neupositionierung des Patienten im Bett.

Die Wechseldruckmatratze der movocare-Serie bietet dem Körper eine Wechseldruckentlastung. Die Matratze besteht aus Zellen der A & B-Gruppe, die aus Nylon-Laminiermaterialien hergestellt sind.

Wenn sich die Matratze zyklisch aufbläst und entleert, bildet sie eine Wellenbewegung, die die Druckpunkte des Patienten abwechselnd, damit der Patient in der bequemsten Position bleibt.

## Anleitung

Überprüfen Sie beim Auspacken der Matratze, ob keines der Teile beschädigt ist. Wenden Sie sich bei Schäden an den Händler oder Hersteller, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Legen Sie die Matratze auf das Bett.
2. Hängen Sie die Pumpe am Fußende des Bettes auf oder stellen Sie sie auf eine stabile Oberfläche.
3. Schließen Sie die Luftschläuche an der Seite der Pumpe an.
4. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter an der Seite der Pumpe auf „O“ (Aus) steht. Schließen Sie den Stecker an die zugelassene Steckdose an (AC220V bis 240V).
5. Über das CPR-Auslassventil an der Seite der Matratze kann die Luft bei einem Notfall des Patienten rasch entweichen.
6. Über den Schalter „STATIK/WECHSELDRUCK“ kann wahlweise der Betriebsmodus geändert werden.

## Körpergewicht

Stellen Sie den erforderlichen Druck entsprechend dem Gewicht des Patienten ein, indem Sie den Gewichtsregler [40 bis 200 kg] am Bedienfeld auswählen.

Hinweis: Wenn das Kopfende des Bettes angehoben ist, muß der Gewichtsregler mindestens um 1 Stufe erhöht werden.

## Zykluszeit

Es gibt vier Zykluszeiten: 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, 25 Minuten. Drücken Sie die entsprechende Taste am Bedienfeld zur Auswahl.

## Modus

Die Pumpe startet immer im Auto-Firm-Modus. Andere Funktionen auf dem Bedienfeld können während des Aufblasens nicht verwendet werden. Wenn die Matratze vollständig aufgepumpt ist, wechselt die Pumpe automatisch in den Wechsel-Modus.

Drücken Sie die Modustaste am Bedienfeld, um den Modus zu ändern. Die Reihenfolge ist:

- Wechselnd
- Konstant
- Sitzfunktion + wechselnd
- Sitzfunktion + konstant
- Max. Aufpumpen

## Modus (Fortsetzung)

### A - Wechselnd

In diesem Modus wechselt der Druck zwischen den Zellen und es stehen vier verschiedene Zyklen zur Auswahl.

### B - Konstant

In diesem Modus wird der Wechselvorgang beendet und der Druck zwischen den Zellen ausgeglichen.


### C - Sitzfunktion

Dieser Modus bietet zusätzliche Unterstützung, wenn der Patient auf der Matratze sitzt. Benutzer können zwischen wechselndem und konstantem Modus wählen. Wenn der Modus „Sitzfunktion + konstant“ ausgewählt ist, dauert dieser 20 Minuten, und die Pumpe wechselt automatisch in den Modus „Sitzfunktion + wechselnd“.

### D - Max. Aufpumpen

In diesem Modus bläst die Pumpe die Matratze mit dem maximalen Druck auf. Dieser Modus wird in Verbindung mit der Patientenversorgung und der Neupositionierung / Übertragung in und aus dem Bett verwendet. Die Pumpe wechselt nach 20 Minuten automatisch in den Wechsel-Modus.

## Bedienfeld

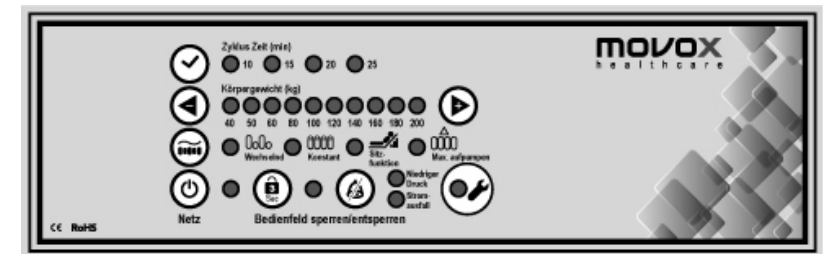

## Bedienfeld sperren/entsperren

Drücken Sie die Taste zum Sperren / Entsperren des Bedienfelds, um das Bedienfeld zu sperren. Benutzer können keine Funktionen auf dem Bedienfeld auswählen. Drücken Sie diese Taste ca. 3 Sekunden lang, um das Bedienfeld zu entsperren.

## Stummschaltung

Der Alarm ertönt, wenn folgende Situationen eintreten:

### Stromausfall

Wenn die Pumpe heruntergefahren oder vom Stromnetz getrennt wird, leuchtet der Stromausfall zusammen mit einem akustischen Alarm auf. Der Alarm wird durch Drücken der Stummschalttaste deaktiviert.

### Druckverlust

Wenn die Niederdruckleuchte leuchtet, liegt der Druck in der Matratze unter dem Normalwert. Sowohl der Licht- als auch der akustische Alarm werden aktiviert. Der Alarm ertönt, bis die Taste ALARM MUTE gedrückt wird.