



Merkmale

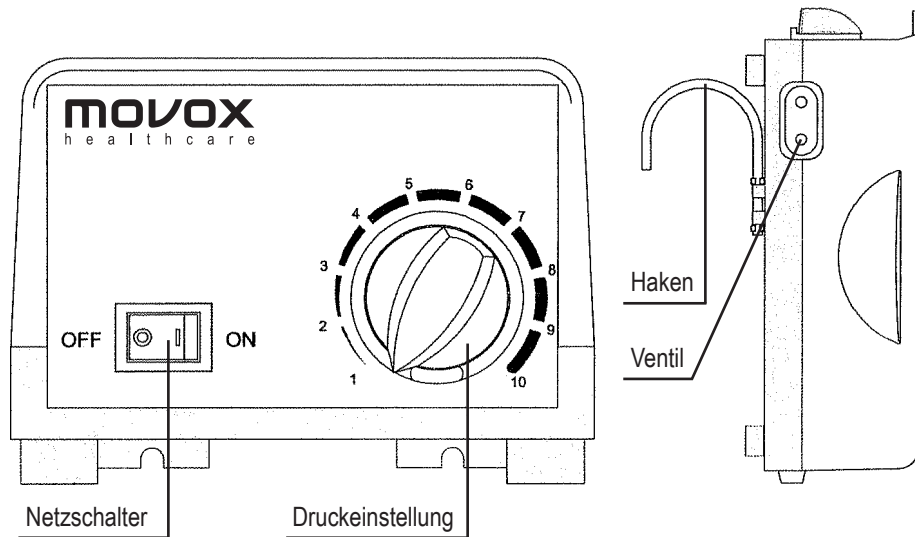

Schaltplan

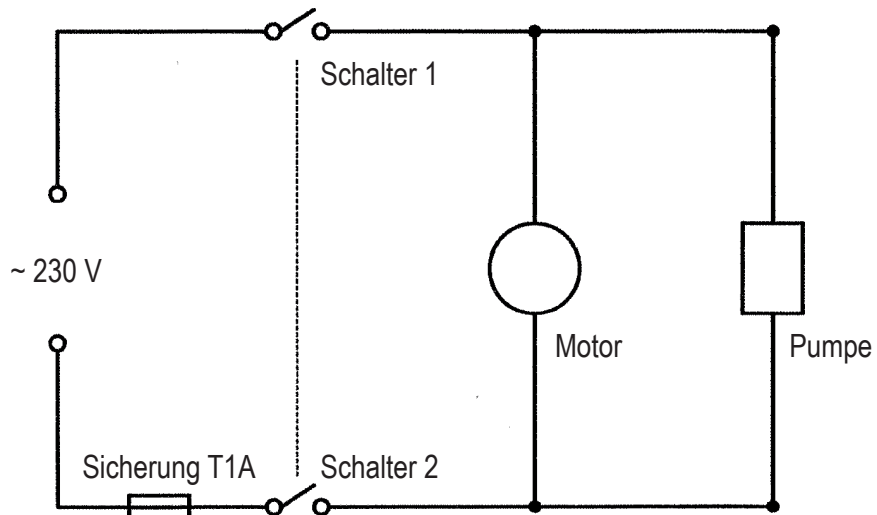

MOVOX
healthcare

movocare
adm one

Wechseldruck-System Dekubitusgrad I

Bedienungsanleitung

movox gmbh
Unterferlach 112
A-9170 Ferlach

www.movox.at
office@movox.at
+43 660 94 82 870

CE RoHS

Funktionsweise

Das Wechseldruck-System besteht aus zwei Teilen: die Matratzenauflage und die Pumpe. Die Pumpe verwendet einen kleinen Kompressor, um leise und energieeffizient zu bleiben. Die Bedienelemente sind einfach und sehr benutzerfreundlich. Die Matratzenauflage entlastet den Druck durch sequentielles Entleeren und Aufblasen der Luftkammern in Intervallen von ca. 6 Minuten. Es ist allgemein anerkannt, dass ständiger Druck auf einen erhabenen Knochen die häufigste Ursache für Hautschäden ist. Die kontinuierliche Bewegung des Geräts verringert die Bereiche mit konstantem Druck und fördert die Durchblutung.

Bedienung

1. Legen Sie die Matratzenauflage mit dem Schlauchende am Fußende des Bettrahmens auf den Bettrahmen.
2. Hängen Sie die Pumpe mit den integrierten Haken sicher an das Fußende des Bettrahmens oder stellen Sie sie auf eine glatte und flache Oberfläche.
3. Schließen Sie die Luftschläuche von der Matratzenauflage an die Pumpe an.
4. Schließen Sie die Pumpe an eine Steckdose an. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht in der Nähe von möglichen Gefahren ist.
5. Schalten Sie den Netzschalter am Bedienfeld der Pumpe ein. Die Pumpe beginnt die Matratzenauflage aufzublasen.
6. Stellen Sie den Härtegrad der Matratzenauflage nach dem Aufpumpen mit dem Einstellrad an der Pumpe ein.

Vorsicht

1. Rauchen Sie nicht in der Nähe der Pumpe.
2. Halten Sie die Pumpe von heißen Oberflächen fern.
3. Explosionsgefahr bei Verwendung in Gegenwart von entflammaren Anästhetika.
4. Sicherung wie angegeben ersetzen: T1A 250V
Leistungsaufnahme: ~230V 50Hz - 0,1A max.

Entsorgung

Matratze / Auflage:

Die in den Matratzen/Auflagen verwendeten Materialien stellen keine Gefahr für die Umwelt dar. Sie können über den Hausmüll entsorgt werden. Vorzugsweise sind sie der zuständigen offiziellen Müllverbrennung zuzuführen.

Steuergeräte:

Die Steuergeräte sind Elektroschrott. Sie sind der dafür zuständigen Entsorgungsstelle zu übergeben.



Die Elektrogeräte der movox gmbh sind registriert (siehe Symbol)

Problembhebung

Prüfen Sie bei Ausfall des Systems:

- Ist das Gerät eingeschaltet?
- Ist das Netzkabel richtig verbunden und der Netzstecker korrekt eingesteckt?
- Ist der Verbindungsschlauch zur Matratzenauflage richtig angeschlossen?

Verständigen Sie, falls diese Maßnahme nicht erfolgreich ist, den zuständigen Lieferanten. Sicherungen dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Personal ausgetauscht werden. Bei Beschädigungen Netzstecker ziehen.

Reinigung

Verschmutzungen können mit lauwarmem Wasser und einem Lappen entfernt werden. Dem Wasser können sanfte Reinigungsmittel zugesetzt werden. Keine aggressiven bzw. scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

Desinfektion

Liegefläche regelmäßig bzw. nach jeder Reinigung desinfizieren. Verwendung von handelsüblichen Flächendesinfektionsmittel bevorzugen. Richten Sie sich nach den Angaben des Präparateherstellers oder lassen Sie sich von den zuständigen Pflegepersonen unterweisen.

Gewichtstabelle

Einstellrad Pumpe MXPU400										
POS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KG	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135

Produktspezifikationen

Abmessungen Matratzenauflage (Länge x Breite x Höhe) Verlängerungslaschen Pumpe (Länge x Breite x Höhe)	200cm x 90cm x 7cm 50cm für beide Seiten 25cm x 12cm x 10cm
Gewicht Matratzenauflage Pumpe	2kg 1kg
Belastbarkeit Max. Patientengewicht	135kg
Elektrik Betriebsspannung Sicherungen	~230V 50Hz - 0,1A max. T1A 250V
Umgebungsbedingungen <u>Betriebsbedingungen</u> Umgebungstemperatur Relative Luftfeuchtigkeit <u>Lager- und Versandbedingungen</u> Umgebungstemperatur Relative Luftfeuchtigkeit	10°C bis 40°C 10% bis 75% -18°C bis +43°C 10% bis 95%